

Ход-Тест 1.0

Инструкция по переустановке ПО

Выполните следующие шаги:

1. Закройте ПО Ход-Тест и остановите службу «Система Ход-Тест»
2. Зарезервируйте БД ХТ: переместите в резервную папку файл WalkMate.sdf , который находится в каталоге: C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Octagram\WalkMate
3. Скопируйте в резервную папку файл Lic#####.kns, где ##### - номер лицензии, который соответствует номеру аппаратного ключа=шнура ТС-6. (Определяется утилитой ftget.exe (<https://octagram.ru/distr/ftget-utilita-chteniya-nomera-klyucha-klu/>) при выключенных ПО и службе «Система Ход-тест»)
4. Скачайте последнюю версию ПО на сайте Октаграм : <https://octagram.ru/distr/hodtest/>
5. Стандартными средствами Windows удалите старую версию ПО Ход-Тест 1.0
6. Установите последнюю версию ПО Ход-Тест v1.0
7. На всякий случай (например, если потребуется тестировать систему ХТ) сохраните чистую БД Ход-Тест. Если необходимо работать с данными старой БД, в папку (C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Octagram\WalkMate) подставьте ранее зарезервированную БД Ход-Тест (WalkMate.sdf).
8. Настройте службу «Система Ход-Тест» на автоматический запуск.
9. Настройте службу «Flexserver» (если есть) на ручной запуск.
10. Перезагрузите ПК.
11. Подключите шнур ТС-6 и запустите ПО Ход-Тест. Проверьте, подхватила ли система старую БД – присутствуют ли старые данные в программе.